




# DFree 装着用シート 使い方

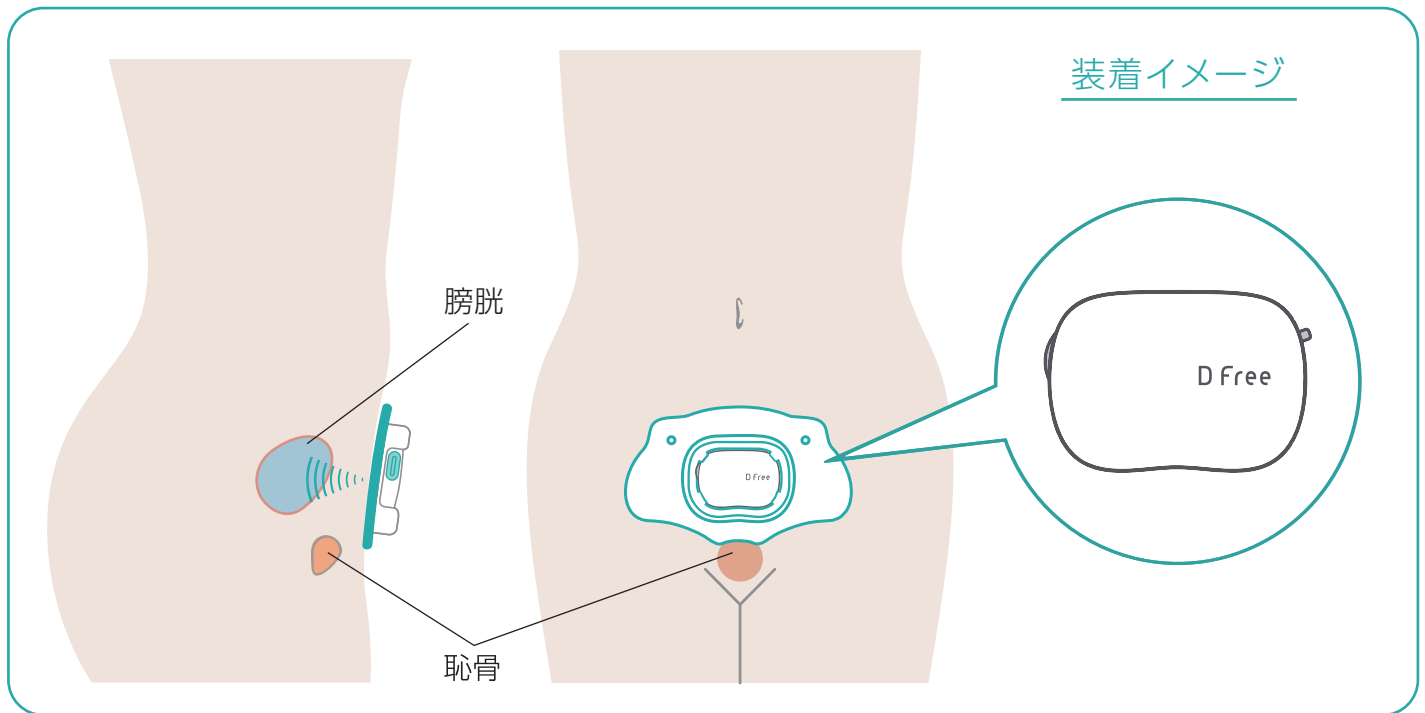

## 装着手順

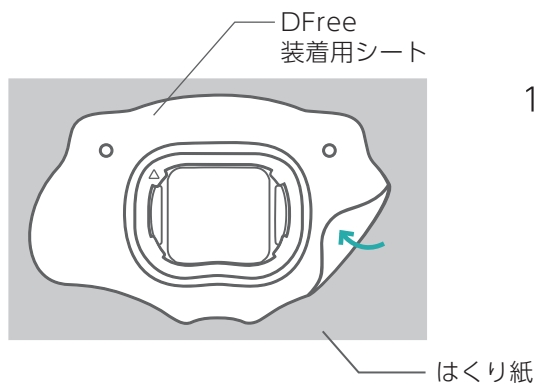

1. はくり紙からDFree装着用シートを剥がします。

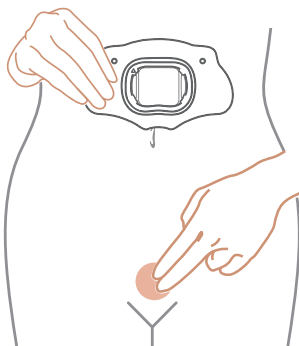

2. 恥骨を探し、どちらか一方の手の指を恥骨に添えます。


※恥骨は、おへそから徐々に指を下げていくと最初に触れる骨になります。

3.


恥骨に添えた指に、DFree装着用シート下部のクボミをあて、肌に貼り付けます。

両端が浮いたり、しわにならないようにシートの端までしっかり貼り付けてください。

※毛によってテープが浮く場合は剃毛をお勧めします。

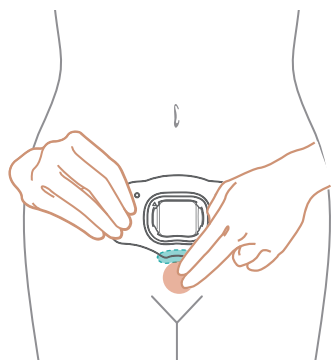



DFree装着用シート  
下部クボミ

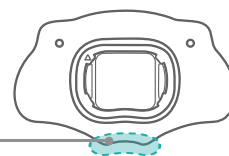

4.

DFree裏面の凸部分にジェルを塗ります。




均一の厚みになるように満遍なく塗り広げてください。

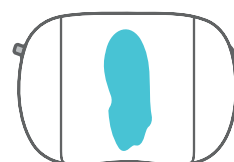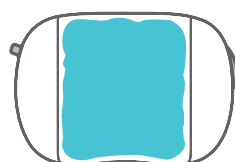


5.

DFreeを正しい向きに持ち、横からはめます。

その際DFreeは奥までしっかりと押し込んでください。

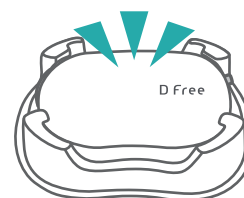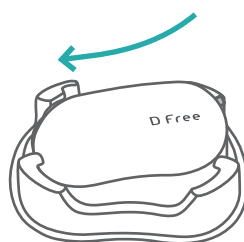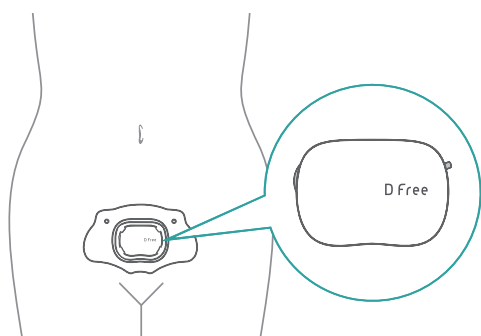

同じ位置につけるために

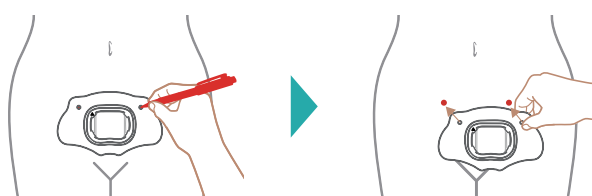

本製品は、同じ位置に装着することで安定したデータを取得することができます。

装着用シートにある2つの穴を利用し、スキンマーカーや油性ペンなど消えにくいペンで肌にマークをつけてください。

翌日以降はこのマークを目印に位置合わせを行うことで、位置ずれなく簡単に装着ができます。




1. 最初にDFreeをDFree装着用シートから取り外します。




2. 水または中性洗剤を染み込ませた柔らかい布でDfreeを拭いてください。充電端子カバーをしっかりとはめた状態であれば水洗いをすることが可能です。

※使用後は充電をしてください。

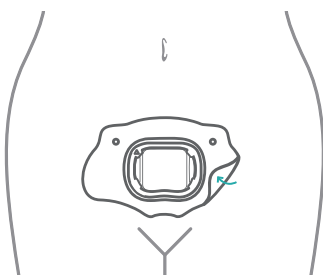

3. 体から丁寧にDFree装着用シートを剥がしてください。一気に剥がすと肌を痛める可能性があります。

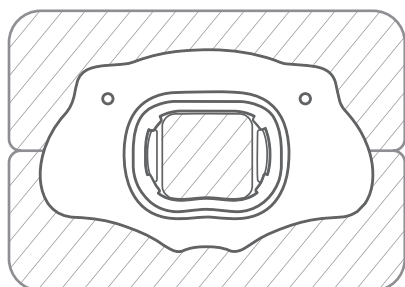

4. 使用後は保管台紙に貼り付けて、次回使用するまで保管してください。ジェルが残っている場合は拭き取ってください。

DFree装着用シートは3回を目安に繰り返し使用できます。  
※粘着力が低下したり、汚れが目立つ場合は新しいものに交換してください。

- 傷口には使用しないでください。また、肌に異常がある場合も使用しないでください。
- 肌のトラブルが起きやすい方は、事前に医師もしくは薬剤師にご相談ください。
- アレルギー体質の方、重度の浮腫の方、肌が非常に弱い方は使用しないでください。
- 肌に優しい粘着テープを使用していますが、全ての人に肌トラブルが起きないわけではありません。
- 本品の使用により、痒み、発疹などの症状があらわれた場合は速やかに使用を中止し、医師もしくは薬剤師にご相談ください。
- 装着する際は肌を清潔にし、よく乾かした状態で使用ください。
- 肌から剥がす際は、肌が持ち上がらないよう手で押さえ体毛方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。
- 直射日光および水濡れを避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- DFree を装着する以外の用途に使用しないでください。
- DFree を外した際は、必ず DFree 装着用シートも身体から剥がしてください。肌トラブルの原因となります。
- 使用した DFree 装着用シートは必ず保管台紙に貼り付け保管してください。
- DFree 装着用シートの使用回数の目安は 3 回です。粘着力の低下や、汚れが目立つ場合は新しいものに交換してください。
- 使用回数の目安は、装着時の姿勢変化の回数や気温による発汗状況などによって異なります。

製品名：DFree 装着用シート  
サイズ：135mm×82mm×15mm