

利用者の声

外出の意欲が出た

DFree
利用前

すぐにトイレに行きたくなくなってしまったため、トイレの不安から外出したり水分を取るのを控えるようになってしまった。



DFree
利用後

取得したデータから、水分をとっても2~3時間程度は尿を溜められることがわかり、安心して外出できるようになった。 70代 女性

外出時のトイレも安心

DFree
利用前

事故で尿意を感じなくなり導尿を行っているが、タイミングがわからず、外出時などの不安が大きい。



DFree
利用後

排尿のタイミングがわかりやすくなったので、外出先でもトイレの準備に焦ることがなくなった。 40代 男性

トイレトレーニングのきっかけに

DFree
利用前

トイレトレーニングでオムツ外しに障がいを持つ子どものトイレがなかなかうまくいかず、オムツを外すことができなかった。



DFree
利用後

トイレに連れて行った方がいいタイミングが見えるようになり、トイレトレーニングに前向きに取り組めるようになった。 30代 女性

夜間のトイレも安心

DFree
利用前

80代の父の介護をしているが、夜間にトイレのために父が一人でベッドから起き出してしまい、度々、転倒があった。




DFree
利用後

夜間トイレに連れて行くタイミングがわかったことで父が一人で起き出して転倒することがなくなった。 50代 男性

製品情報



DFree 本体
(DFree-U1P)

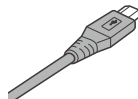

充電用
USB ケーブル



超音波用ジェル
(60ml)



装着用テープ
(50mm×7m)

製品名 : DFree-U1P

製品仕様

大きさ	本体部 : W83 × D80 × H33 (mm)	動作時間	約 24 時間 (満充電には約 4 時間必要)
	センサー部 : W54 × D35 × H12 (mm)	付属品	超音波用ジェル、装着用テープ
重さ	90g	通信方式	Bluetooth® 4.1
電源	内蔵リチウムイオン電池		

DFree スターターセット

49,880円 (税抜)



+



ご購入方法

webからの購入はこちら

<https://personal.dfree.biz/>

お電話でのご購入はこちら

050-3205-0810

DFree

検索



データが取れない、利用方法がわからないなど
ご不明点がある場合は

<https://triplew.zendesk.com/> を参照ください

製造元 **トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社**

〒100-0006

東京都千代田区有楽町 1-5-2 東宝ツインタワービル 3 階

🏠 <https://dfree.biz>

✉ sp-jp@www-biz.co

☎ 050-3205-0810 受付時間 : 10:00~17:00 月~金 (祝日、年末年始は除く)

トイレのタイミングを 事前にお知らせ!

ディーフリー

D Free



✓ アプリが
トイレのタイミングを
お知らせ

✓ 膀胱の状態を
リアルタイムで
確認

✓ ログ機能で
振り返り可能



製造元 **トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社**

こんなお悩みの方に…

- トイレが近くて常に不安
- いつ導尿すればよいかわからない
- 尿意がないのでたまり具合がきになる

DFreeなら
膀胱の状態を
リアルタイムで
確認することが
できます



- 急に尿意を感じてトイレに間に合わない
- トイレ誘導のタイミングがわからない
- 外出時のトイレが見つからないと不安

DFreeなら
アプリがトイレ
のタイミングを
お知らせして
くれます



DFreeができること

排尿の见えない不安を 見える安心へ

- ✓ 膀胱の状態をアプリで表示
- ✓ トイレのタイミングをお知らせ
- ✓ 外出時にも装着可能
- ✓ 排泄の記録を残せる




DFreeについて

DFreeの仕組み

超音波で膀胱の
膨らみを計測

スマートフォンと
連動

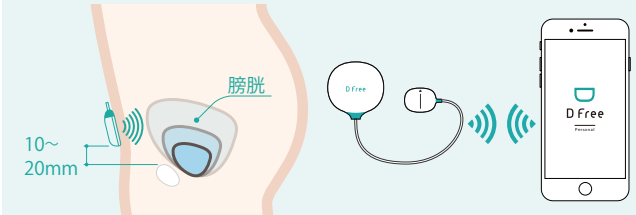

- ※下記のような方はデータが取れない可能性があります※
- 下腹部の脂肪が厚い方
 - 下腹部の皮膚が極度に弛んでいる方
 - 尿をためることが出来ない方
 - 下腹部に大きな手術痕のある方
 - 肌の赤み・かぶれの発生によって利用が再開できない方
 - 未就学児などの小さなお子さま
 - 妊娠中の方
 - 犬や猫などの動物

アプリ機能 (ご利用には専用アプリが必要です)

おしっこの
タイミングを
お知らせ

尿のたまり
具合を表示

排尿ログの
確認・分析



※対応 OS は iOS10.0 以上、Android4.4 以上になります