

トイレで 出せた!

DFree HomeCareは 「1日でも長く トイレで排尿したい!」 という気持ちに寄り添う製品です。



DFree HomeCare を使うと…

1



今どれだけ
尿が溜まっているか
一目で分かる

2



トイレの
タイミングを
事前にお知らせ

通知をもとに、誘導することでトイレでの排泄が可能に!

2022年4月、**特定福祉用具**に認定!

要支援 / 介護認定の方は、介護保険適用で 1 割～3 割負担で購入可能です。
介護保険適用でご購入を検討される方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。



そろそろ通知

通知ラインを設定することで、排尿前にトイレ誘導の目安となる通知が届きます。

事前
にお知らせ!




でたかも通知

尿のたまり具合が低下したタイミングで、排尿後にパッド交換の目安となる通知が届きます。

事後
にお知らせ!

「そろそろ通知」を活用した基本の流れ

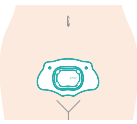

DFree装着



尿がたまる



そろそろ通知



トイレ/介助



記録

安心の超音波

エコー診断にも利用されている人体に影響のない超音波センサーを利用し、尿がたまることによって、水風船のように形が変化する膀胱の大きさを捉えます。超音波センサー 4 個のうち、何個のセンサーが反応しているかを分析することで、膀胱の大きさを 10 段階で測定します。



機器構成

DFree と専用お知らせ機器が Bluetooth で接続するため、Wi-Fi などネットワーク環境は必要ありません。専用お知らせ機器は DFree 機能に制限されます。



※10～15mの同じ空間の直線距離で壁や階をまたぐ場合を除きます。

DFree装着用シート

姿勢変化によるズレを抑え、安定した測定を行うために、専用の DFree 装着用シートをご利用ください。シートを下腹部に貼付し、ジェルをつけた DFree を中央部のスペースにはめるだけなので、簡単に装着することができます。3～5 回を目安に繰り返しご利用可能です。



製品仕様と販売価格

希望小売価格 **99,000 円 (税込)**

※DFree 本体と専用お知らせ機器のセット販売
※介護保険適用で 1～3 割負担になります

DFree製品仕様		専用お知らせ機器	
サイズ 幅 51×奥行 36×高さ 17mm	使用電池	リチウムイオン二次電池	ディスプレイサイズ 7インチ
重さ 26g	動作時間(充電時間)	約40時間※(約4時間)	通信方式 Bluetooth® LE 5.0
防水性 水洗い可能(充電端子カバーを閉じた状態)	通信方式	Bluetooth® LE 5.0	主な付属品 ACアダプター
※充電残量や温度環境、ご利用の測定モードにより異なります。 ・専用お知らせ機器は、DFreeの利用用途以外ではご使用いただけません。 ・製品仕様・外観およびサービス内容は予告なく変更することがございます。この情報は2022年8月現在のものです。			
TAISコード：01915-000002			

■ 消耗品について ご購入については当社までお問い合わせください。9,000円以上で送料無料になります。

DFree装着用シート※	スタンダードタイプ(医療用テープを使用)	12枚(約2か月分)	1,980円(税込)
	プレミアムタイプ(シリコンテープを使用)	6枚(約1か月分)	3,828円(税込)
超音波ジェル	ジェル1本(約1か月分)		550円(税込)

※プレミアムタイプはよりお肌への負担が少ないシリコンテープを使用しています。

購入前の無料フィッティング

利用者さま、及び各事業者が購入前に試用できるフィッティングのための無償貸出を行います。フィッティングによってDFreeにてデータが取得可能なことを確認することができます。
購入前にケアマネージャーさまからフィッティング依頼して頂き、デモ機を準備、初動はフィッティング同行も承ります(初回無料)。

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
URL: <https://www-biz.co> MAIL: care@www-biz.co