

リモートアプリ

- リモートアプリとは
- 基本の連携方法3ステップ
- アカウント情報を開示しない場合の連携方法（外部との連携）
- サブスクリプション登録/解約について

遠隔で通知受け取り & データ確認ができます！

DFree 装着者

D Free メインアプリ



介護者（見守る側）

＼自宅でも /
通知受け取り



D Free リモートアプリ

＼職場でも /
数値確認



＼病院・学校でも /
排尿データ共有



プレミアムサービス※でより詳しく分析しよう！

※有料（月額・年払い）のサブスクリプション制です。

分析！

01

過去データの
振り返りができる




もちろん！
リアルタイム
のデータ
確認も



分析！

02

排尿表でトイレの
成功やもれを確認できる

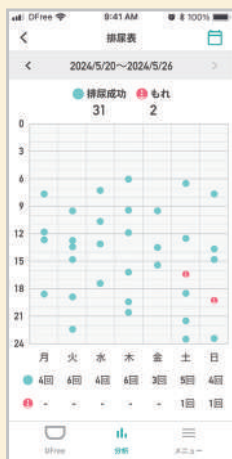


12:00と
18:00は
トイレに
行こう

分析！

03

分析結果を確認し
トイレの進捗を確認できる

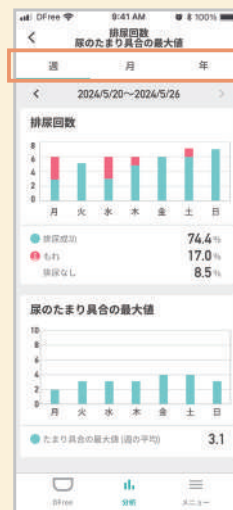

週・月・年単位

成功率
・もれ率

ためられる
おしっこの量

例えば
こんな場面
で活用！

お子様の外出中に

遠隔からでもデータを確認できるから、子供が学校や遊びに出かけているときでも、排尿状況を安心して見守ることができます。



先生とのトイレ相談に

装着者の排尿データを確認できるから、病院の先生や学校の先生に情報を共有してトイレの相談することもできます。



基本の連携方法 3 ステップ

1 メインアプリで新規登録

メインアプリを起動し、メニュー画面から、「設定」>「アカウント情報」より、新規登録を行ってください。



2 リモートアプリをインストール

D Free Remote

データの確認や通知を受け取りたいスマートフォンをご準備ください。そのスマートフォンに「DFree個人リモート」アプリをインストールします。下記QRコードを読み取りダウンロードしてください。

iOS
の方はこちら



Android
の方はこちら



各ストア内で「DFree」と検索してインストールすることもできます。

3 リモートアプリでログイン

リモートアプリを起動し、メインアプリと同じアカウントで「ログイン」してください。ログイン後、メインアプリのDFreeデータおよび通知情報が連携されています。



アカウント情報を開示しない場合の連携方法（外部との連携）

学校や病院などの外部にアカウント情報を開示することが難しい場合は、下記手順に沿うことで別のアカウント間で連携が可能です。

※アカウント情報の開示が問題ない場合は、同じアカウント情報でログイン可能

※共有先のスマートフォンでもリモートアプリのアカウント登録が必要

① メインアプリで連携に必要なQRコードを表示する

メニュー画面から、「設定」>「リモートアプリ連携」ボタンを押します。ページ下部の「アカウント追加の連携方法こちらから>」を押した後、「次へ」※ボタンを押すと、QRコードが表示されるので、その画面を開いたままにしておいてください。

※初めてご利用の方は、「次へ」のあとの新規登録を先に行ってください。



② リモートアプリをインストール

D Free Remote

データの確認や通知を受け取りたいスマートフォンをご準備ください。そのスマートフォンに「DFree個人リモート」アプリをインストールします。下記QRコードを読み取りダウンロードしてください。

iOS
の方はこちら



Android
の方はこちら



各ストア内で「DFree」と検索してインストールすることもできます。

3 リモートアプリでアカウントの新規登録

リモートアプリを起動し、「新規登録」を行ってください。

その後、ホーム画面の「QRコードを読み取る」ボタンをタップすると、カメラが起動します。

>>手順①のメインアプリを用意してください。



4 QRコードを読み取る

リモートアプリのカメラで、メインアプリに表示されたQRコードを読み取ってください。

※QRコードの読み取りが難しい場合があります。QRコードがクリアに映っていることを確認して、スキャン画面の青枠内におさめてください。



5 連携できたか確認する


QRコードを読み取った後、リモートアプリのアカウント名がメインアプリに追加されていることを確認してください。追加されていれば、リモートアプリ連携は完了です。



サブスクリプション登録 / 解約について

① サブスクリプションの登録方法

分析画面の「詳しくみる」ボタンを押し、「プレミアムサービス」画面で「年割プラン」か「1ヶ月プラン」のどちらかご希望のボタンを押します。この後、App Store (iPhone) または Google Play (Android) の購入画面が表示されます。画面の指示に従い、購入手続きを完了してください。

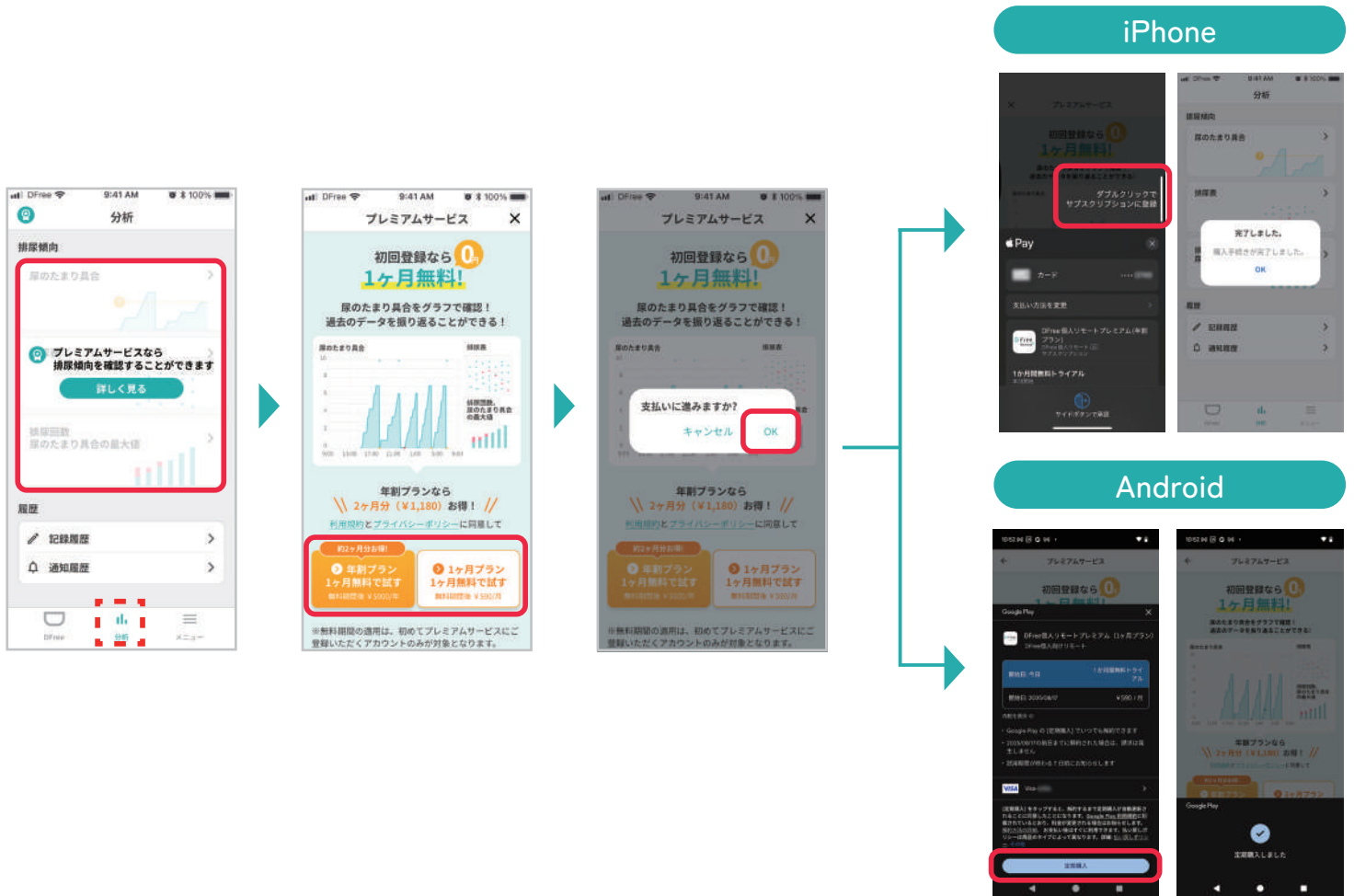

② サブスクリプションの解約方法

App StoreまたはGoogle Playストアのアカウント設定にて、ご自身で自動更新の停止手続きを行ってください。

※アプリをアンインストールしただけでは解約とはなりませんのでご注意ください。

次回の更新とご請求について

現在の契約期間が終了する24時間前までに解約しない限り、サブスクリプションは自動更新となり料金が請求されます。

解約をご希望の場合は、お早めに手続きをお願いいたします。