

装着方法

安定したデータを取るために、毎日同じ位置に装着してください。

- テープによる装着


用意するもの



DFree



ジェル

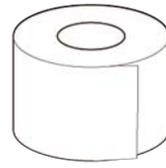


テープ

仮止め用：7cm1片
本止め用：15cm2片
を用意します。

1 センサー部を貼り付ける位置を決める



仰向けの状態で衣服を下ろし、手で恥骨の位置を確認してください。

※恥骨は、へそから徐々に指を下げていくと
見つけやすくなります。最初に触れる骨が
恥骨になります。

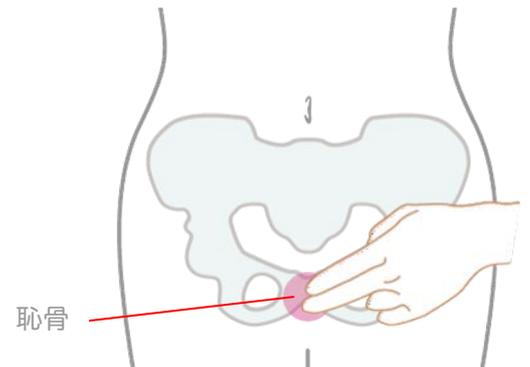


2 仮止めをする

恥骨から1~2cmほど上に、センサー上面の矢印をへそ側に向けて、テープで仮止めします。センサー下側までテープで固定しないようにしてください。

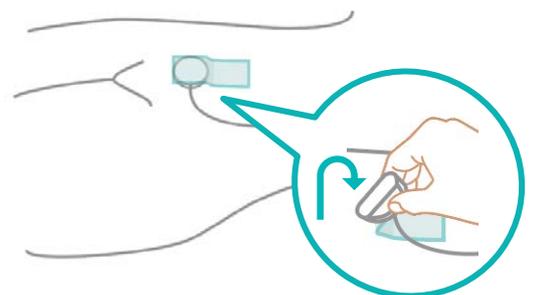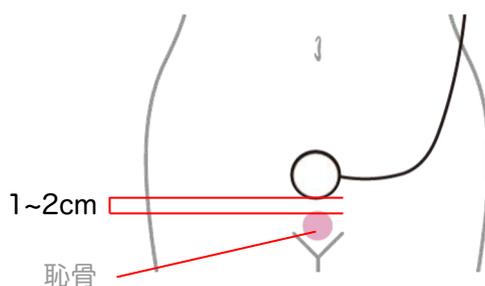


3 ジェルを塗る

仮止めしたセンサー裏面を表に向けてください。
平らな部分にジェルを塗布し、平面全体にジェル
を均等に広げてください。

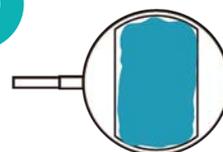

隙間なく広げる

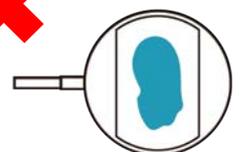


隙間がある

装着方法


4 センサーをテープで固定する

長めに切った2~3片のテープで、センサーをしっかり固定します。

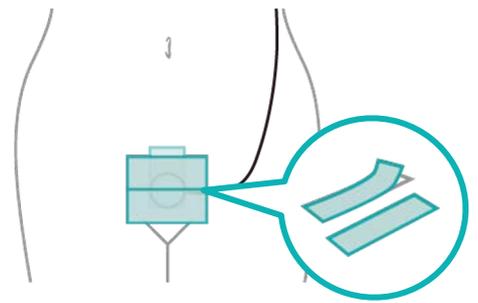

5 本体部をクリップで固定する


上着につけるとズボンを脱ぐ時も安心です。

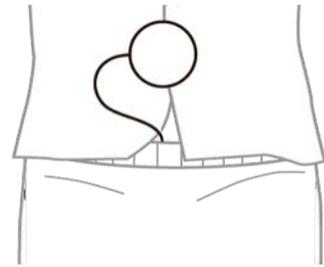

- DFreeの取り外し (テープ)


1 テープとセンサーを外す

肌に負担がかからないように片手で肌を押さえながらゆっくりとテープを剥がします。

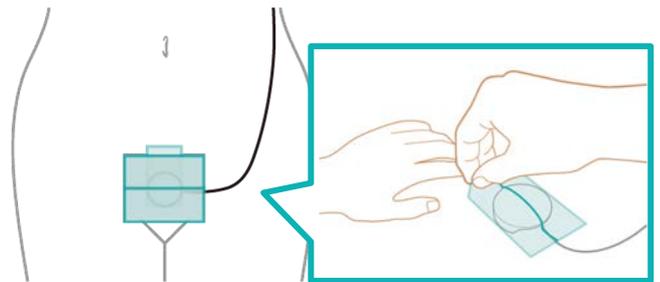

2 ジェルを拭き取る

体に残ったジェルを優しく拭き取り、センサー部に付着したジェルも拭き取ります。

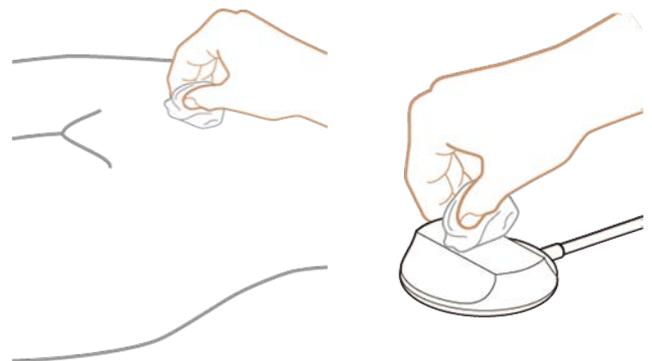

- お手入れ方法



水または中性洗剤を染み込ませた布で拭き取る。



・水洗い
・シンナーなどの有機溶剤
・研磨剤入りクリーナーのご使用はおやめください。

NG

